

ZEISS IOLMaster 700 Atualização de segurança ("PrintNightmare")



Seeing beyond

ZEISS IOLMaster 700 Atualização de segurança (“PrintNightmare”)

Observação: este documento não substitui o manual do usuário fornecido com o dispositivo.

Sobre a atualização

“PrintNightmare” é o nome de uma falha de segurança que atinge dispositivos que funcionam com sistemas operacionais Microsoft Windows. Segundo a Microsoft, “Há uma vulnerabilidade de execução de código remoto quando o serviço Windows Print Spooler executa operações de arquivo de forma indevida com determinadas permissões. Um invasor poderia explorar com sucesso esta vulnerabilidade e executar códigos arbitrários com permissões do sistema. O invasor poderia instalar programas, visualizar dados, modificar ou excluir ou criar novas contas com direitos de usuário ilimitados.”

O “PrintNightmare” não prejudica a segurança nem o funcionamento do ZEISS IOLMaster 700. Contudo, oferecemos uma atualização de segurança (Patch) para o seu dispositivo, a fim de solucionar a vulnerabilidade causada pelo “PrintNightmare”.

Mídia de armazenamento necessária

Para fazer o download da atualização antes da instalação, é necessário um dispositivo de memória USB vazio com pelo menos 2 GB de capacidade de armazenamento.

Preparação

- Faça o download dos arquivos a seguir e salve-os diretamente no diretório raiz do dispositivo USB:
- 000000-2485-398_Vs01_IOLMaster700UpdateOperatingSystem.upt


Como instalar a atualização no ZEISS IOLMaster 700




1. Desligue o IOLMaster.
2. Ligue novamente o IOLMaster.
3. Inicialize a tela de abertura de sessão.
4. Faça o login como "Administrator".




5. Conecte o dispositivo USB em que se encontram as atualizações baixadas no IOLMaster.

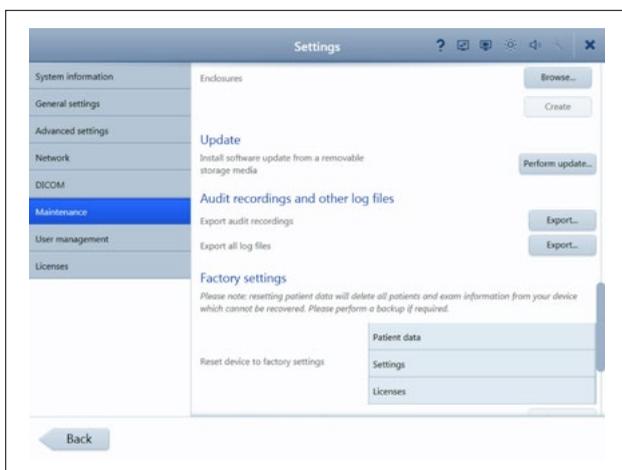

6. Acesse as configurações (pelo símbolo da chave inglesa).
7. Acesse o item de menu "Maintenance".
8. Role para baixo até a seção "Update".
9. Clique em "Perform update".

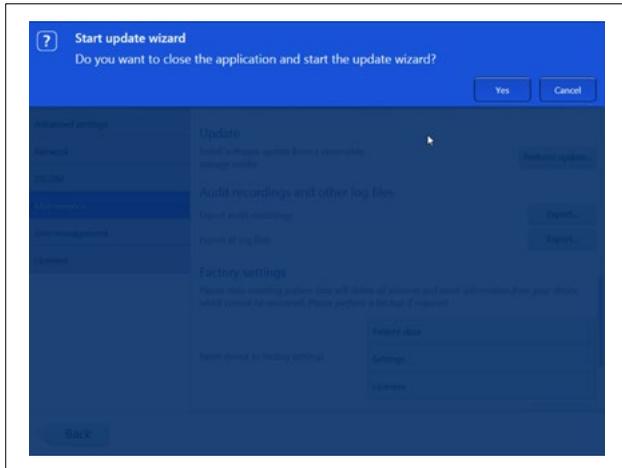


10. Para iniciar a atualização, clique em “Yes” na janela.
NOTA: Este procedimento pode levar até um minuto.

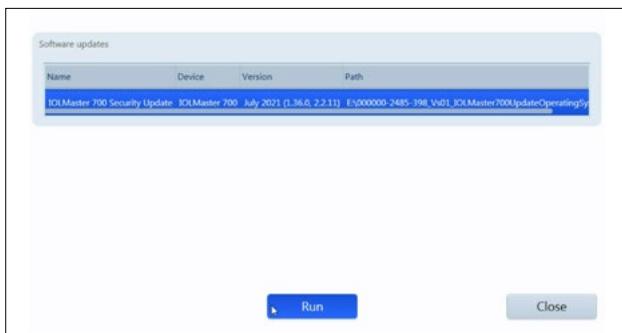

11. Selecione a atualização de software da lista.
 12. Clique em “Run”.
 13. O IOLMaster será reiniciado automaticamente.



14. Agora, o IOLMaster instala a atualização de software. Esse procedimento leva de 5 a 30 minutos. Siga as instruções apresentadas na tela. Em casos especiais, pode ser necessário instalar a atualização de software uma segunda vez. Nesse caso, o IOLMaster o guiará por esse segundo processo de instalação.

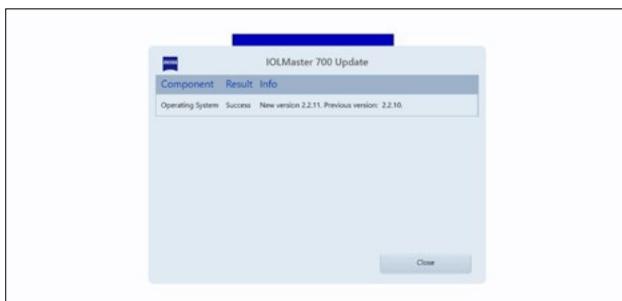

15. Assim que a atualização estiver concluída, é aberta a janela de diálogo abaixo. Leia a mensagem que confirma que o sistema realizou a instalação com sucesso.
 16. Clique em “Close”, para concluir o processo de atualização.
 17. Agora, o IOLMaster será reiniciado automaticamente.
 18. O dispositivo USB pode ser removido.

**Explore mais vídeos especializados,
documentos de ajuda, perguntas e
respostas no ZEISS Product Insights.**



**A página web de
ZEISS Product Insights**



Carl Zeiss Meditec AG

Göschwitzer Strasse 51-52

07745 Jena, Alemanha

www.zeiss.com/med

info.meditec@zeiss.com

000000-1932-169-AddGA-BR-260821