

## ZEISS IOLMaster 700 安全更新 ("PrintNightmare")



Seeing beyond

# ZEISS IOLMaster 700 安全更新 ("PrintNightmare")

请注意: 本文档不得替代设备随附的用户手册。

## 关于更新

"PrintNightmare" 是一个会影响安装有微软 Windows 操作系统的设备的安全漏洞。据微软证实,“当 Windows Print Spooler 服务以特定权限执行不允许的文件操作时, 存在一个与远程代码执行相关的安全漏洞。攻击者可利用此安全漏洞使用系统权限执行任意代码。然后可以安装程序, 显示、更改或删除数据, 或创建用户权限不受限制的新帐户。”

虽然 "PrintNightmare" 不会影响 ZEISS IOLMaster 700 的安全性和功能性, 但我们仍为您的设备提供安全更新 (补丁), 以修复 "PrintNightmare" 安全漏洞。


## 所需储存载体

如要在安装前下载更新, 您需要一个存储容量至少为 2 GB 的空U盘。

## 准备工作

- 下载以下文件并将其直接保存到U盘根目录下:
  - 000000-2485-398\_Vs01\_IOLMaster700UpdateOperatingSystem.upt


# 如何在 ZEISS IOLMaster 700 上安装更新

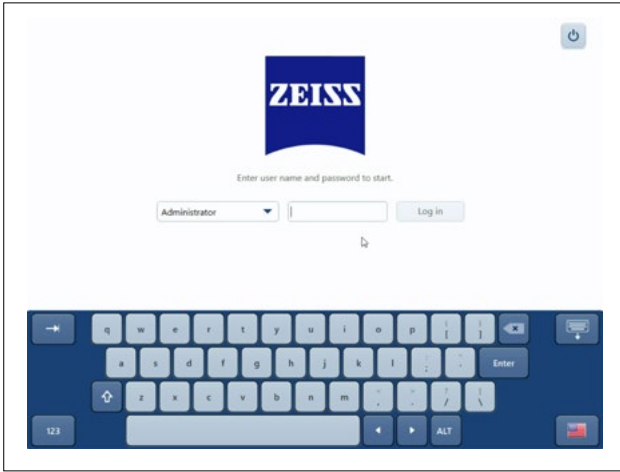


1. 关闭 IOLMaster。
2. 重新开启 IOLMaster。
3. 调出登录页面。
4. 以“管理员”身份登录。



5. 将包含有已下载更新的U盘连接至 IOLMaster。

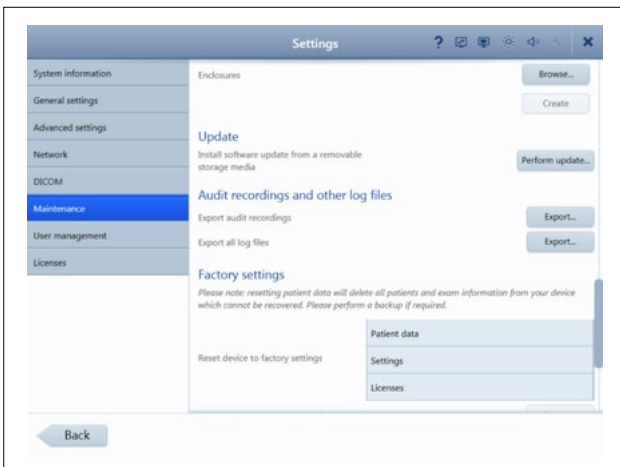


6. 调出设置 (通过扳手图标)。
7. 调出 "Maintenance" 菜单项。
8. 向下滚动至 "Update" 部分。
9. 点击 "Perform update"。

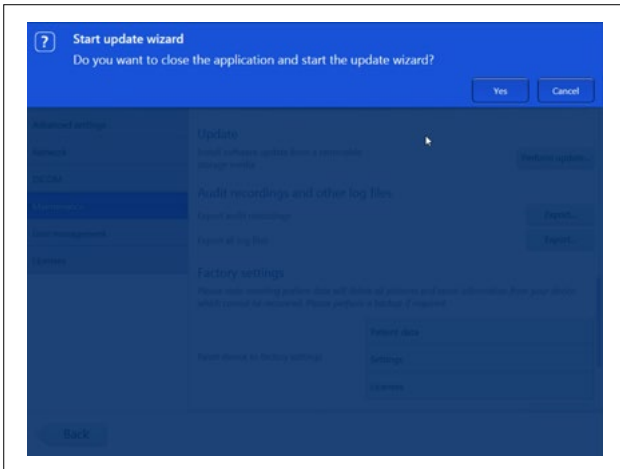

10. 点击弹窗中的 "Yes" 开始更新。

**提示：** 该过程可能需要1分钟。

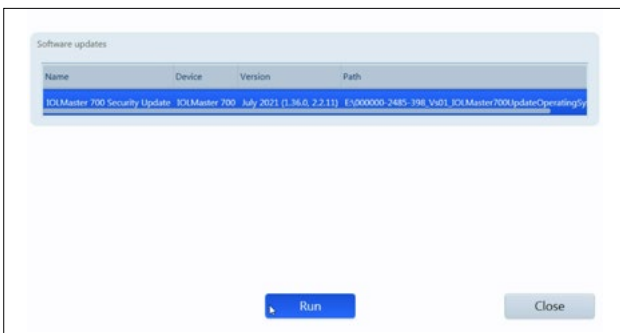


11. 选择列表中的软件更新。

12. 点击 "Run"。

13. IOLMaster 将自动重启。



14. 现在, IOLMaster 开始安装软件更新。该过程可能需要 5 至 30 分钟。请按屏幕上的指示操作。在个别情况下, 可能需要再次安装软件更新。在这种情况下, IOLMaster 还将引导您完成第二次安装过程。

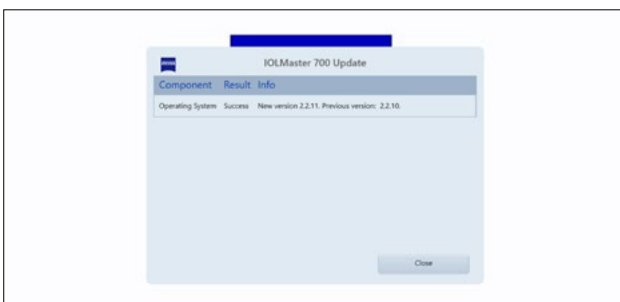

15. 安装完毕后, 将显示旁的对话框。请阅读消息, 以确认系统更新成功。

16. 点击 "Close" 结束更新流程。

17. 现在, IOLMaster 将自动重启。

18. 您可以重新拔下U盘。

欲了解更多专家视频、帮助文档以及常见问题, 请访问 **ZEISS Product Insights**。



**ZEISS Product  
Insights** 网站



**Carl Zeiss Meditec AG**

Göschwitzer Strasse 51-52

07745 Jena, 德国

[www.zeiss.com/med](http://www.zeiss.com/med)

[info.meditec@zeiss.com](mailto:info.meditec@zeiss.com)

000000-1932-169-AddGA-CN-260821